

## Higienske maske za obraz 3-slojne

Hraniti na suhem mestu. Zaščititi pred vplivom sončne svetlobe.

Rok uporabe: 2 leti od datuma odtisnjene na embalaži. Uporabljati v skladu z navodili na embalaži

Prodajalec: H.B.C. d.o.o., Kavčičeva ulica 4, 2000 Maribor, proizvedeno na Kitajskem

Material: netkan poliester, filter papir. Pakiranje : 50 kos

**Higienska maska ni medicinski pripomoček in ni osebna varovalna oprema za varovanje dihal!**

**Higienska maska ni primerna za otroke mlajše od 3.let**

### Navodilo za uporabo:

#### PRAVILNA NAMESTITEV MASKE

1. Dobro umijemo roke z milom in vodo ali razkužimo z razkužilom
2. Masko obrnemo tako, da bo vgrajena kovinska žlička na zgornji strani.  
Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter.
3. Ko smo zanke zatakneli za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pritisnemo ob nos, tako, da se maska tesno prilega obrazu.
4. Masko pritisnemo čez nos, spodnji del maske potegnemo čez brado
5. Masko smo pravilno namestili na obraz. Očala gredo preko maske. Maske se ne dotikamo več.

#### PRAVILNA ODSTRANITEV MASKE

1. Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa razkužimo z razkužilom.
2. Pazimo, da se maske primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.
3. Masko za enkratno uporabo večkrat prepognemo od zunanje strani navznoter, povežemo z elastiko, zavijemo v papir in vržemo v koš z mešanimi odpadki.
4. Ponovno si umijemo roke z milom in vodo ali razkužimo z razkužilom